


Analprobe med 2 elektrodebånd beregnet til træning af bækkenbunden for behandling af inkontinens

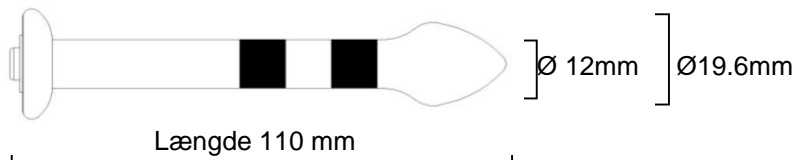

Brugervejledning:

- Tag proben ud af emballagen og rengør i henhold til nedenstående
- Påfør et tyndt lag intimgel eller glidecreme (vandbaseret) og indført forsigtigt proben. Kun bundringen skal være synlig – juster længden ved at dreje på ringen, om nødvendigt.
- Sørg for at apparatet er slukket og tilslut proben til bækkenbundstrænerens ledninger
- Følg manualen for den anvendte bækkenbundstræner
- Med analproben skal du anvende programmet 'STRES' eller 'TONE'
- Efter endt behandling, udtager du forsigtigt proben, skiller den fra styreenheden og rengør i henhold til nedenstående.



Rengøring

- Proben er personlig og må kun bruges af én bruger.
- Rengør proben i mildt lunkent sæbevand eller med alkohol-fri desinfektions servietter. Skyl efter med koldt vand.
- Aftør med en ren papirserviet og lad lufttørre helt, inden du pakker den væk
- Rengøringsmidler, der indeholder alkohol må *ikke* anvendes
- Denne probe kan ikke steriliseres



Forholdsregler

Brug ikke denne probe, hvis du har:

- Muskeldefekt i behandlingsområdet.
- Blære eller vaginalinfektion.
Anvendelse af probe kan forværre og sprede infektionen
- Livmoderhalskræft
Laboratorietest viser, at elektrisk stimulation kan fremme celledeling
- Hvis du har – eller har haft - epilepsi
Elektrisk stimulation kan udløse anfald
- Hvis du har pacemaker.
Anvendelse af elektrisk stimulation kan påvirke pacemakerens signaler
- Graviditet.
Elektrisk stimulations påvirkning af fosteret er ukendt



SPØRG ALTID DIN LÆGE, HVIS DU ER I TVIVL

ADVARSEL


1. Opbevares tørt og væk fra varmekilder.
2. Forbind ALDRIG proben til et højfrekvent apparat (for stærk strøm kan opvarme elektroderne)
3. Dette apparat og er kun beregnet til behandlinger af kort varighed.
4. Berør ikke elektrodebåndene mere end højst nødvendigt..
5. Elektrodebåndene indeholder nikkel.

Dette medfører risiko for allergisk reaktion hos personer, som er følsomme overfor nikkel



Etiket

Etiketten, der sidder på ledningen indeholder vigtig information om produktionsnummer, producent og CE nummer. FJERN DEN IKKE !

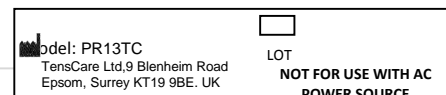



TensCare Ltd
9 Blenheim Road
Epsom
Surrey KT19 9BE. UK
Tel + 44 (0) 13 7272 3434
painaway@tenscare.co.uk
www.tenscare.co.uk



PR13TC Analprobe

Varenr.: X-PR13

Lille diameter: Max 19.6mm Min 12mm
To elektrodebånd
Justerbar længde

Forhandles af:
MediGroup
Kajerødgade 38
3460 Birkerød

Tlf.: (+45) 45 76 54 25
info@medigroup.dk
www.hjemmetest.dk

