



Nellcor™

**Bærbart SpO₂-patientmonitoreringsystem
PM10N**

Vejledning til hjemmebrug



COVIDIEN

positive results for life™

© 2013 Covidien. Alle rettigheder forbeholdes. COVIDIEN, COVIDIEN med logo, og Covidien-logoet og Positive Results for Life er registrerede varemærker i USA og internationalt tilhørende Covidien AG.


Mærket ^{TM*} angiver varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Andre mærker er varemærker tilhørende et Covidien-selskab.

Indhold

1	Velkommen	5
2	Sikkerhedsoplysninger	7
3	Opsætning af monitoreringssystemet.....	11
4	Monitorering af patienten	17
5	Skift af sensoren.....	35
6	Rengøring af monitoreringssystemet og sensoren	37
7	Tilbehør.....	41
8	Symboler	43
	Ordliste	45
	Indeks.....	48

Support 1.800.635.5267

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**Angiv din klinikers
kontaktoplysninger her:**



Bemærkninger:

1 Velkommen

Denne vejledning er til plejeren i hjemmet – den person, som i hjemmet plejer en patient, der monitoreres med Nellcor™ Transportabelt SpO₂-patientmonitoreringssystem (PM10N). Læs hele vejledningen, før monitoreringssystemet tages i brug.

Hvilken funktion har monitoreringssystemet?

Monitoreringssystemet måler patientens pulsfrekvens og procentdelen af oxygen, der cirkulerer i blodet (*funktionel iltmætning*). Når patientens pulsfrekvens eller iltprocent bliver lavere eller højere end nogle foruddefinerede alarmgrænser, advarer monitoreringssystemet dig ved at udsende en lydalarm, vise en indikator og blinke et tal.

Support 1.800.635.5267

Monitoreringssystemet kan bruges til patienter i alle aldre – spædbørn, børn og voksne. Din kliniker vil hjælpe dig med valget og brugen af den rette Nellcor™-sensor ud fra patientens størrelse og alder.

Hvad er din rolle som plejer?

Klinikeren vil instruere dig i at:

- Tænde og slukke for monitoreringssystemet
- Fastgøre sensoren til patienten
- Reagere på alarmer
- Kontakte klinikerne med spørgsmål eller tvivl



Hvad er klinikerens rolle?

Klinikeren er en sundhedsfagligt uddannet person, som:

- bestiller et monitoreringssystem og sensorer til brug i hjemmet
- opsætter monitoreringssystemet for dig
- hjælper dig med monitoreringen af patienten og besvarer eventuelle spørgsmål
- gennemgår monitoreringsresultaterne og patientens tilstand
- sikrer, at monitoreringssystemet fungerer korrekt
- har regelmæssige opfølgningssamtaler med dig for at sikre, at monitoreringssystemet opfylder dine behov

Hvis du har nogen spørgsmål om oplysningerne i denne vejledning, kan du spørge klinikerens.



Support 1.800.635.5267



2 Sikkerhedsoplysninger

Læs dette kapitel omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte klinikeren.

Sikkerhedssymboler

	ADVARSEL Advarsler advarer brugerne om potentielt alvorlige konsekvenser (dødsfald, personskade eller utilsigtede hændelser) for patienten, brugeren eller miljøet.
	Forsigtig Identificerer forhold eller metoder, der kan medføre skade på udstyr eller anden ejendom.



ADVARSLER

- Eksplosionsfare – Anvend ikke monitoreringsystemet ved tilstedeværelse af brændbare stoffer.
- Fare for stød – Brug kun AA-batterier. Brug ikke forskellige typer eller modeller af batterier, såsom lithium-ion og nikkel-metalhydrid-batterier, sammen.
- Fare for stød – Luk batteridækslet forsvarligt for at forhindre fugt i at trænge ind i monitoreringsystemet.
- Fare for stød – Brug ikke monitoreringsystemet, mens batteridækslet er åbent eller fjernet.

- Fare for stød – Undlad at nedsænke eller hælde væske på sensoren.
- Anbring kablerne forsigtigt for at mindske risikoen for, at patienten vikler sig ind eller kvæles.
- LCD-panelet (displayet) indeholder toksiske kemikalier. Rør ikke ved beskadigede LCD-paneler.
- Undlad at genbruge sensorer, der er beregnet til engangsbrug. Spørg klinikerne, hvis du er i tvivl.
- Vævsskader kan skyldes forkert anvendelse eller brug af en pulsoximetrissensor. Stram ikke sensoren for meget eller ved brug af for stor kraft. Undlad at vikle sensoren rundt, bruge ekstra tape eller lade sensoren sidde for længe samme sted.
- Undlad at tildække eller blokere for hullerne til højttaleren eller at slukke for eller sænke lyden i lydalarmerne, hvis det kan kompromittere patientens sikkerhed.
- Brug ikke et monitoringsystem eller en sensor, der synes at være beskadiget.
- Pulsoximetrimålinger og pulssignal kan påvirkes af patientforhold, hvis patienten bevæger sig for meget, sensorapplikationsfejl og særlige miljøforhold.
- Tildæk pulsoximetrissensoren med gennemsigtigt materiale for at sikre, at der foretages nøjagtige målinger i god belysning.
- For at sikre, at produktet fungerer optimalt og giver nøjagtige målinger, må kun tilbehør, der er leveret eller anbefalet af Covidien, anvendes. Brug tilbehør i henhold til deres respektive anvisninger.
- Undlad at fastklemme pulsoximetrikablet, da det kan blive beskadiget.
- De eneste dele i monitoringsystemet, som brugeren skal servicere, er de fire AA-batterier.

Du må godt åbne batteridækslet for at skifte batterierne, men kun kvalificeret servicepersonale må fjerne dækslet eller tage adgang til interne komponenter af nogen årsag. Ingen af monitoreringssystemets komponenter må ændres.

- For at undgå, at batterierne kommer til skade, må de ikke kastes, slås, tabes, stødes eller kommes under tryk.
- Hold monitoreringssystemet og batterierne uden for børns rækkevidde for at undgå eventuelle ulykker.
- Fjern batterierne fra monitoreringssystemet, inden det rengøres.



Forholdsregler

- Monitoreringssystemet vil muligvis ikke fungere, hvis det betjenes eller opbevares under forhold uden for de områder, der er angivet i denne vejledning, eller hvis det udsættes for kraftige stød eller tabes.
- Vær opmærksom på eventuel interferens fra kilder til elektromagnetiske forstyrrelser, såsom mobiltelefoner, radiosendere, motorer, telefoner, lamper, elektrokirurgiske enheder, defibrillatorer og andet medicinsk udstyr. Hvis pulsoximetrimålingerne ikke er som forventet for patientens tilstand, skal alle kilder til mulig interferens fjernes.

- Brug af andet tilbehør, andre sensorer og andre kabler end de angivne kan medføre, at der opnås unøjagtige målinger fra monitoreringssystemet, og at der opstår øget emission og/eller mindsket elektromagnetisk immunitet af monitoreringssystemet.
- For at undgå at kortslutte batterierne må batterierne ikke komme i kontakt med metalgenstande på noget tidspunkt, især under transport.
- Følg de lokale myndigheders bestemmelser og genanvendelsesanvisninger vedrørende bortskaffelse af monitoreringssystemet og dets komponenter, herunder batterier og tilbehør.

3 Opsætning af monitoreringssystemet

Udfør følgende trin for at klargøre monitoreringssystemet til brug med din patient:


- Identificer monitoreringssystemets dele
- Isæt batterierne
- Tænd monitoreringssystemet
- Tilslut en sensor til monitoreringssystemet og til patienten

Driftsmiljø

For at sikre, at apparatet er pålideligt, skal monitoreringssystemet betjenes inden for et temperaturinterval på 5 °C til 40 °C (41 °F to 104 °F), en fugtighed på 15 % til 95 % (ikke-kondenserende) og i en højde af -390 til 5.574 m (-1.280 til 18.288 fod).

Support 1.800.635.5267


Dele af monitoreringssystemet

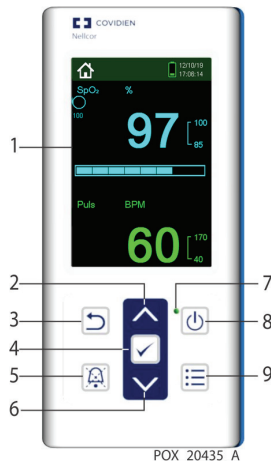

- 1 Display
- 2 Op-knap
- 3 Returknop
- 4 OK- (vælg) knap
- 5 Slå alarmlyd fra-knap
- 6 Ned-knap
- 7 Indikator for tændt apparat
- 8 Tænd/sluk-knap
- 9 Knappen Menu

Isæt batterierne

1. Brug 4 AA-lithiumbatterier.
2. Sørg for, at begge batterier vender rigtig.

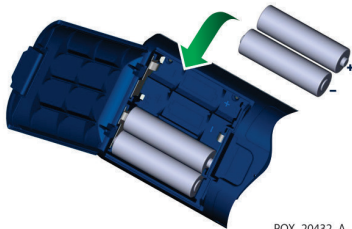


POX_20432_A

Tænd monitoringsystemet

1. Tryk på tænd/sluk-knappen i cirka 1 sekund.
2. Sørg for, at du hører et bip (alarmlyden testes), og at monitoringsystemets hovedskærm vises.

Lyset ved siden af tænd/sluk-knappen bliver grønt.

Support 1.800.635.5267

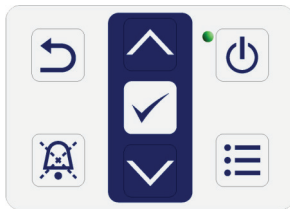


12

PM10N Vejledning til hjemmebrug

Sluk monitoringsystemet

1. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den i cirka 1 sekund.
2. Sørg for, at skærmen og det grønne lys er slukket.

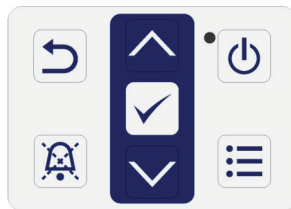

Identificer stik


1. Sensorstik
2. Servicestik (må ikke anvendes, medmindre klinikerens anviser dette).



Fastgør sensoren til patienten


1. Fastgør sensoren til det rette sted på patienten (f.eks. finger, pande, næse eller fod).

Hvis sensoren ikke er fastgjort til patienten, vil du se dette billede på skærmen.

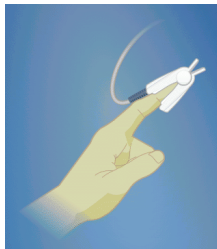


Forbind sensoren til monitoringsystemet

1. Sæt sensoren godt på plads i stikket.
2. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sørge for, at den er omhyggeligt forbundet til sensorstikket.

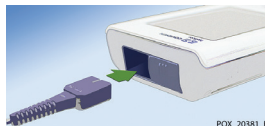


Hvis sensoren eller forlængerledningen mangler eller ikke er omhyggeligt forbundet, vil du se dette billede på skærmen.

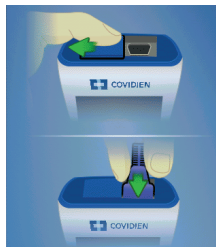

Kontrollér virkemåde


1. Se på displayet, om det viser værdier for iltmætning (SpO₂ %) og pulsfrekvens i det forventede område.
2. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte klinikerens.

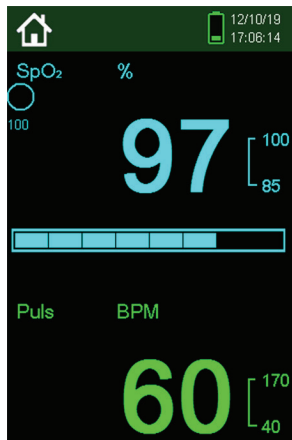

4 Monitorering af patienten


Når du har fuldført opsætningsopgaverne, er du klar til at monitorere patienten. Mens du monitorerer patienten, skal du udføre følgende opgaver:

- Registrere hovedskærmens udseende under normale forhold
- Bekræfte, at monitoreringssystemet modtager et godt signal fra sensoren
- Identificere alarmer, advarsler og indikatorer
- Skifte indstillinger såsom lysstyrke og lyd på monitoreringssystemet efter behov
- Se og rapportere monitoreringshistorikken i overensstemmelse med klinikerens anmodninger

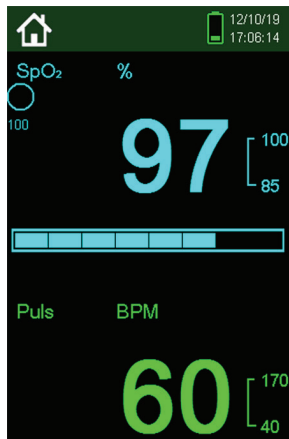


Identificere komponenter på hovedskærmen

1. Indikator for hjemmepleje
2. SatSeconds™-indikator (klinikeren vil forklare denne funktion yderligere, hvis det er nødvendigt)
3. Batteriets strømniveau
4. Dato og klokkeslæt
5. Aktuell SpO₂-måling (oxygen) i %
6. Øvre og nedre alarmgrænser for SpO₂ i %
7. Pulsindikator (lysbjælke)
8. Aktuell pulsfrekvens (slag i minuttet, BPM)
9. Øvre og nedre alarmgrænser for pulsfrekvens (BPM)

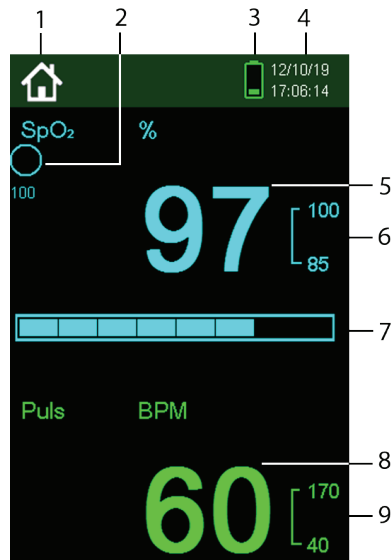


Identificere sensor fjernet fra patienten

1. Sæt sensoren tilbage på patienten (finger, pande eller næse).
2. Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte kliniker.

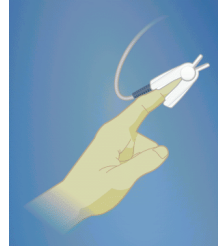

Identificere sensor koblet fra monitoreringssystemet

1. Sæt sensorstikket forsvarligt fast i stikket øverst på monitoreringssystemet.
2. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte kliniker.

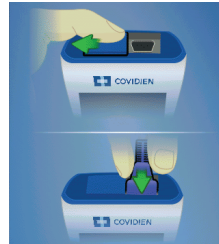


Identificere alarm for pulsfrekvens

Høj eller lav pulsfrekvens

Kontakt kliniker.

Lav pulsfrekvens

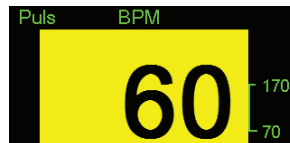


Identificere SpO₂-alarm

Høj eller lav SpO₂ %

Kontakt kliniker.

SpO₂ lav

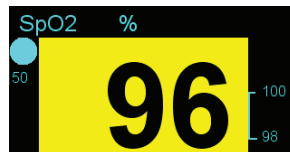

Identificere alarm slået fra

Slå en alarm midlertidigt fra ved at trykke på Slå alarm fra-knappen.



Alarm slået fra-symbolet vises på skærmen sammen med den resterende tid, inden alarmeren skal afbrydes.



Identificere signalinterferens

1. Sluk anden elektronik i nærheden.
2. Bed patienten om at være rolig.
3. Hvis interferenssymbolet stadig vises på skærmen, skal klinikerens kontaktes.



Identificere lav batterispænding

Batteri OK

Færre bjælker angiver mindre strøm.



Symbol for lav batterispænding

Hvis der monitoreres kontinuerligt, skal batterierne udskiftes i løbet af 15 minutter. Hvis der monitoreres for spotundersøgelser, skal batterierne udskiftes inden næste brug.



Symbol for kritisk lav batterispænding

Udskift batterierne så hurtigt som muligt.



Betjene knapper

- 1. Tænd/sluk:** Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for monitoreringssystemet. 
- 2. Slå alarm fra:** Tryk ned én gang for midlertidigt at slå alarmlyden fra. 
- 3. Menu:** Tryk ned én gang for at se listen over tilgængelige indstillinger. 
- 4. Tilbage:** Tryk ned én gang for at gå tilbage til den forrige skærm. 
- 5. Op/ned:** Tryk ned én gang for at bevæge dig op eller ned i menuen eller for at øge eller sænke værdien med én. Tryk og hold nede for at bevæge dig hurtigere gennem menuen eller for at øge eller sænke værdien med mere end én. 

- 6. OK:** Tryk ned én gang for at vælge et menupunkt eller en værdi. På skærmen Monitoreringshistorik kan du trykke for at ændre intervallet af målinger, der vises, mellem 1, 5, 100 eller 500. 

Identificere menupunkter

Gem spotmåling giver dig mulighed for at afbilde den måling, der vises i øjeblikket.

Lydindstillinger giver dig mulighed for at justere volumen for alarmer, pulssyd og tastaturlyd.

Indstillinger for lysstyrke giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

Pauseskærm giver dig mulighed for at indstille det tidsrum, der går, inden skærmen bliver sort, hvis der ikke trykkes på monitoreringssystemets taster.

Monitoreringshistorik giver dig mulighed for at se de gemte målinger.



Gemme spotmåling

1. Tryk på knappen Menu.
Gem spotmåling (øverste punkt) fremhæves.
2. Tryk på OK for at vælge Gem spotmåling.
3. Meddelelsen "Spotmåling gemt" vises.



Justere lydstyrke

1. Tryk på knappen Menu.
2. Tryk på pil ned, indtil Lydindstillinger fremhæves.
3. Tryk på OK for at vælge Lydindstillinger.
4. Vælg de lydindstillinger, du vil ændre.
Alarmvolumen vises som et eksempel på næste side.



Eksempel på Alarmvolumen

Hvis du for eksempel vil ændre alarmvolumenen:



1. Tryk på OK, når Alarmvolumen fremhæves.
2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge en volumen.
3. Tryk på OK for at vælge volumenen.

Bemærk: Du kan også justere Pulsvolumen ved at trykke på pil op eller pil ned, mens monitoreringssystemets hovedskærm vises.





Justere lysstyrke

1. Tryk på knappen Menu.
2. Tryk på pil ned, indtil Indstillinger for lysstyrke fremhæves.
3. Tryk på OK for at vælge Indstillinger for lysstyrke.
4. Tryk på pil op eller pil ned for at justere lysstyrken efter behov.
5. Tryk på OK for at vælge lysstyrkeindstillingen.

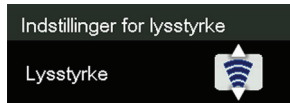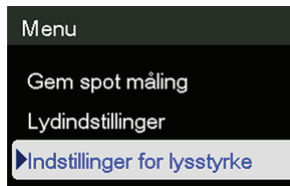


Indstille Pauseskærm

1. Tryk på knappen Menu.
2. Tryk på pil ned, indtil Pauseskærm fremhæves.
3. Tryk på OK for at vælge Pauseskærm.
4. Vælg mellem to indstillinger:
 - Tryk på pil op for at fremhæve Aldrig, og tryk på OK.

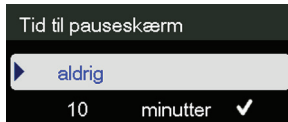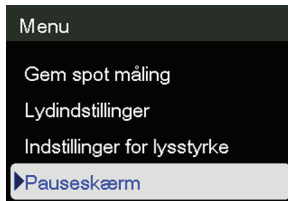


- Du kan også trykke på OK for at ændre antallet af minutters inaktivitet, inden Pauseskærm aktiveres.
 - Hvis du vil ændre antallet af minutter, skal du trykke på pil op eller pil ned.
 - Tryk på OK for at vælge det antal minutter, der angives på displayet.

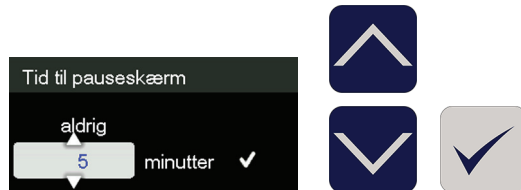

Vise monitoreringshistorik

1. Tryk på knappen Menu.
2. Tryk på pil ned, indtil Monitoreringshistorik fremhæves.
3. Tryk på OK for at vælge Monitoreringshistorik.
4. Vælg Vis spotdata eller Vis kontinuerlige data.
5. Tryk på OK.

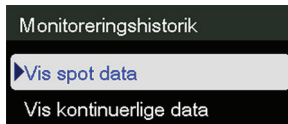

6. Når der vises kontinuerlige data, skal du trykke på OK igen, hvis du vil justere intervallet for de viste målinger til 1, 5, 100 eller 500 datapoint.

Historiktabel (1)			
Tid	SpO ₂	Puls	Status
12/10/14			
•21:36:14	97	60	
•21:36:10	97	60	
•21:35:55	97	60	
•21:35:25	97	60	



Historiktabel (100)			
Tid	SpO ₂	Puls	Status
14/3/4			
14:16:32	90	60	
14:14:52	90	60	
14:12:51	---	---	SD

Fortolke statuskoder

Status	Beskrivelse
LM	Manglende puls, patientbevægelse
LP	Manglende puls
CB	Kritisk lavt batterispænding
LB	Lav batterispænding
SO	Sensor fra patient
SD	Sensor koblet fra monitoreringssystem
AO	Alarmlyd slukket
AS	Alarmlyd slået fra
MO	Signalinterferens, patientbevægelse
PS	Pulssøgning

Historiktabel (100)			
Tid	SpO ₂	Puls	Status
14/3/4			
14:16:32	90	60	
14:14:52	90	60	
14:12:51	---	---	SD
14:11:11	90	60	
14:09:31	90	60	
14:07:51	90	60	

Bemærk:

Support 1.800.635.5267

34

PM10N Vejledning til hjemmebrug

5 Skift af sensoren

Klinikeren kan hjælpe dig med at afgøre, hvornår sensoren skal udskiftes eller flyttes til en anden placering på patienten. Tjek følgende, når en sensor har været anvendt på patienten i en periode:

- Patientens hud er ved at blive tør, rød eller øm under sensoren. **Kontakt din kliniker med det samme, og skift sensorens placering.**
- Sensorens klæbemiddel sidder ikke særlig godt fast.
- Sensoren falder let af eller falder af umiddelbart efter, at du har sat den fast på patienten.

Eksempler på sensorplacering



Sensoroplysninger

Nogle sensorer leveres i steril emballage og andre gør ikke. Hvis du har spørgsmål om de sensorer, du bruger på patienten, skal du kontakte klinikerens.

6 Rengøring af monitoreringssystemet og sensoren

Du kan rengøre monitoreringssystemet jævnlige for at holde det pænt, og så du nemt kan se displayet. Du skal desuden rengøre systemet omgående, hvis der spildes væske på det.

Anbefalede rengøringsmaterialer

- Blød klud
- Vand fra hanen
- Isopropylalkohol
- En vådserviet (spørg klinikerens)



Rengøring af monitoreringssystemet

1. Fjern sensoren fra patienten, sluk for monitoreringssystemet, og fjern batterierne for at undgå muligt stød.

2. Fugt en blød klud i vand fra hanen eller isopropylalkohol. Hvis kluden bliver helt gennemvædet, skal du starte forfra med en tør klud.

Du kan også bruge en vådserviet, som klinikerens har anbefalet.

3. Tør nænsomt alle overfladerne på monitoreringssystemet af.
4. Lad monitoreringssystemet tørre.



Support 1.800.635.5267

Rengøre sensoren



1. Hvis sensoren kan genbruges, skal du spørge klinikerens, hvordan den skal rengøres.
2. Hvis sensoren er til engangsbrug, skal du regelmæssigt kassere den og udskifte den med en ny.

Klinikerens vil vejlede dig i, hvor ofte den skal udskiftes.
3. Når du har rengjort en genanvendelig sensor, skal du lade den tørre.

Genopstarte monitoreringssystemet

1. Tænd for monitoreringssystemet. Sørg for, at det tændes korrekt.
2. Lyt efter det hørbare bip, der angiver, at lyden virker.
3. Se på displayet for at sikre, at det tændes, og at det viser SpO₂- og pulsfrekvensområderne.
4. Hvis monitoreringssystemet fungerer korrekt, skal du sætte sensoren på monitoreringssystemet og på patienten.
5. Monitorér patienten som sædvanlig.

Bemærk:

Support 1.800.635.5267

40

PM10N Vejledning til hjemmebrug

7 Tilbehør

Monitoreringssystemet har en smule tilbehør.
Spørg klinikerens, om du kan bruge tilbehøret.

Forlængerledning

(DEC-4)



Beskyttelsesetui





Support 1.800.635.5267

Taske









42






PM10N Vejledning til hjemmebrug

8 Symboler

Symbolerne på mærkaterne på monitoreringssystemet beskrives i dette kapitel.

Symbol	Beskrivelse
	Receptpligtig anordning
	Brugsanvisningen skal følges
	Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
	Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Symbol	Beskrivelse
IP22	Indtrængningsbeskyttelses- (IP) skala: Beskyttet mod adgang til farlige dele med en finger eller fast genstand større end 12,5 mm. Beskyttet mod faldende vanddråber med apparatet vippet op til 15 grader fra normal position.
	Type BF anvendt del
	UL-klassificeret (testet af Underwriters Laboratories til specifikke krav for USA og Canada)
CE 0123	CE-mærke – Godkendt til salg og brug i Europa

Symbol	Beskrivelse
	Repræsentant fra den Europæiske Union
	Referencekode (varenummer)
	Producent
	Serienummer
	Fremstillingsdato

Ordliste

BPM	<i>Se Pulsslag i minuttet eller pulsfrekvens (HR).</i>	Kliniker	En sundhedsfagligt uddannet person, der hjælper dig med monitorering af patienten og brugen af monitoreringssystemet i hjemmet. Denne person kan være en læge eller sygeplejerske, der behandler patienten, eller en anden sundhedsfagligt uddannet person.
Hjertefrekvens	Det antal gange, hjertet slår, normalt en værdi i minuttet.		
Iltmætning (saturation)	En måling af den iltprocent, der cirkulerer i blodet. Iltmætning betegnes også %SpO ₂ .		

Monitoreringssystem Det apparat, der er beskrevet i denne vejledning til hjemmebrug, som bruges til at måle en patients SpO₂ og pulsfrekvens.

Omgivende lys Lyset i området omkring patientsensoren. Stærke omgivende lyskilder, såsom lysstofrør, infrarøde varmelamper og direkte sollys, kan påvirke en SpO₂-sensors ydeevne.

Plejer

Pulsslag i minuttet eller pulsfrekvens (HR)

Den person, som tilser patienten og kontrollerer monitoreringssystemets målinger samt placeringen af sensorer.

Pulsfrekvens. En måling af det antal gange hjertet slår pr. minut. Pulsfrekvensen kaldes også hjertefrekvens, slag i minuttet eller BPM.

Sensor

Tilbehør, der bruges til at indsamle og sende patientoplysninger til monitoreringssystemet. Den ene ende af sensoren placeres på patientens finger, tå, øreflip eller pande, og den anden ende af sensoren kobles til monitoreringssystemet.

Sensoren indsamler målinger ved at registrere patientens pulsfrekvens og blodets iltprocent og sende disse oplysninger til monitoreringssystemet.

Sensorplacering

SpO₂ (%SpO₂)

Det sted på patientens krop, hvor sensoren placeres, som f.eks. en finger, panden eller næsen.

En estimering af iltmængden i blodet, som monitoreringssystemet måler.

Indeks

A

advarsler 7-9
alarm slået fra, symbol 21
alarmer 20-21

B

batterier 12, 22
beskrivelse af
monitoreringssystem 5

D

dato og tid 18
dele på
monitoreringssystemet 11
display,
monitoreringssystem 18

F

fluebensknop (OK) 11, 23
forholdsregler 9-10

H

højde over havet, drift 11
klinikerens rolle 6
luftfugtighed, drift 11

M

menuknap 11, 23
miljømæssige forhold 11

O

OK-knap 11, 23
opsætning 11-16
oxygenmåling (SpO₂ %) 18

P

pil ned-knap 11, 23
pil op-knap 11, 23
pilknapper 11, 23
plejerens rolle 5
pulsmåling (BPM) 18

R

returknop 11, 23

S

sensor 14-15, 19, 35-36, 38
sikkerhedsoplysninger 7-10
slå alarm fra-knap 11, 23
SpO₂-måling (oxygen) 18

T

temperatur, drift 11
tilbehør 41
tænd eller sluk for
monitoreringssystemet
12-13
tænd/sluk-knap 11, 23

Bemærk:

Rx
ONLY


CE
0123

Part No. PT00097721 Rev A (A7365-3) 2019-02

COVIDIEN, COVIDIEN with logo, and Covidien logo and Positive Results for Life are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG.

TM brands are trademarks of their respective owners. Other brands are trademarks of a Covidien company.

© 2013 Covidien. All rights reserved.

 Covidien llc, 15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA.

EC REP Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore,
Ireland.

www.covidien.com