

Varenavn: Nåleholdere

Gældende for varenumre: 10010, 10029, 10219, 10027, 10028, 10083, 10194, 10142, SC-6020, 10030

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: Disse nåleholdere bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

Tilsligtet anvendelse af instrumentet: Nåleholdere anvendes til at holde en nål eller en anden genstand og låse grebet om denne.

Nåleholdere har en gribeflade med mønster, så nålen kan fastholdes.

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af produktet: Enheden er lavet af en gribeflade i den ende og et håndtag i den anden ende. Nåleholdere findes forskellige størrelser og modeller.

Garanti: Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: ingen specielle krav

Rengøring: Tør produktet af med en fugtig klud eller et overfladerensmiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

Desinfektion: Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

Sterilisering: Produkterne kan steriliseres i en autoklave. Produkterne er fremstillet af rustfrit stål.

Vedligeholdelse: Produkterne behøver jævnlig vedligeholdelse. - Produkternes lås skal olieres med hvid olie af medicinsk kvalitet.

Inspektions- og funktionstest: Sørg for at produktet let kan åbnes og lukkes. Undersøg visuelt for skader og slid.

Emballage: Nåleholderne er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

Opbevaring: ingen særlige krav

Bortskaffelse: Dette produkt kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse