

Rengøring og vedligeholdelse

Clipsen med sensoren bør omgående rengøres efter hvert brug. Rengøringen foretages med rent vand på en klud og med aftørring med en blød klud eller tørring med en hårtørrer.

Hverken alarm eller sensor må dyppes i vand.

Det er en god ide at checke batteriet jævnlige, så bagbeklædningen skrues af, og det sikres, at batteriet ikke lækker.

Hvis alarmerne ikke anvendes igennem længere tid, bør batteriet oplades ca hver 2. måned for at forlænge batterilevetiden.

Alarmerne er personlige, så vi anbefaler ikke, at den anvendes af flere personer.

Specifikationer

Enhedens diameter:	5 cm
Føler ledningslængde:	95 cm
Alarm volumen	50-82 DB
Indgangsspænding	5V
Maksimal driftstrøm	150 MA
Kapacitet Li-ion batteri	500 mAh
Spænding Li-ion batteri	3,7 V
Opladningstid	ca 2 timer



Seagull vådligeralarm flex manual

Seagull sengealarm kan anvendes til alle med inkontinens problemer.

Vi anbefaler, at alarmerne testes, før den tages i brug. Testen kan foretages ved slå alarmerne til og ved derefter at tage et fugtigt stykke stof/papir og sætte i clipsen. Hvis alarmerne vibrerer eller spiller og blinker, fungerer alarmerne.

Det kan tage et par dage for brugeren at finde ud af at reagere på lyden og vibrationen.

Når alarmerne anvendes om natten, anbefaler vi, at en natlampe er tændt, så brugeren lettere vågner og let kan finde på toilet.

Opladning

Batteriindikatoren blinker rødt, når batteriet trænger til opladning, og det lyser rødt under opladningen.

Hvis batteriet bliver helt tømt, vil alarmerne slukke og derfor ikke virke.

Sæt det medfølgende USB stik i et stik eller en computer (ikke apple) og sæt det i alarmerne.

Når batteriet er opladt, vil indikatoren lyse blå.



Bemærk at alarmerne kan oplades uanset hvilket mode, den er indstillet på. Første gang, alarmerne oplades, anbefaler vi, at den anvendes, indtil batteriet er tømt, og derefter kan det oplades efter ønske. Alarmerne bør ikke anvendes, mens den oplades.

Indstillinger (Mode)

Alarmen har 3 alarmindstillinger: musik, vibration og vibration med musik.

Tryk længe på **mode** knappen (D) for at slukke alarmen helt, så den ikke reagerer ved fugt. Tænd på tilsvarende måde

Tryk hurtigt på **mode** knappen (D) for at skifte imellem musik, vibration og musik med vibration.



Musik

Musikvolumen ændres ved et kort tryk på + eller -.

Musiknummeret ændres ved et længere tryk på + eller -.

Der er 10 numre på alarmen. Hvis man ønsker at lægge egen musik tale ind, skal dette findes som MP3 fil.

Forbind alarmen til computeren og hold **Mode** knappen inde. Stifinderen åbner med et vindue med filerne. Upload de ønskede filer og slet eventuelt de oprindelige.

Påsætning af alarm og sensor

Alarmen kan enten sidde på armen, benet eller i trusekanten.

Åben elastikken og tilpas den til arm/ben. Sæt alarmen fast på overarmen. Sørg for at ledningen aldrig ligger rundt om halsen



Sæt clipsen fast på underbukserne der, hvor de først bliver fugtige. Vi anbefaler, at underbukserne er af bomuld, da det giver den bedste ledeevne til sensoren.



Skub lukkemekanismen fremad for at sikre, at sensoren sidder godt fast.

Bortskaffelse

Bortskaf apparat og batterier efter lokale bestemmelser. Dette af hensyn til miljøet.

Angående Batterier:

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydset skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Seagull-healthcare.dk