

Dominant Eye Test Box

-

Varenr.: DET

Sådan samler du boksen:

1. Læg den flade boks med instruktionssiden nedad.
2. Fold alle fire sider indad langs med de markerede linjer.
3. Fold langs med de markerede linjer, i de fire ydre kanter på kassens lange sider.
4. Put den buede ydre sektion, ind i de lodrette åbninger på de to korte sider, ude fra og ind.

Anvendelse:

Testen foretages bedst, når personen sidder.

Hold boksen i en arms længde med hullet og cirklen vendt mod testpersonen og med den åbne side vendt opad.

Hold begge øjne åbne og juster placeringen af boksen eller flyt hovedet, så den røde stjerne kan ses i midten af hullet.

Luk et øje ad gangen og check hvilket øje, der beholder stjernen i hullet.

Resultat

Det dominerende øje er det, som beholder stjernen i hullet.