

Varenavn kirurgiske sakse

Gældende for varenumre: 10006, 10007, 10008, 10009, 10011, 10012, 10033, 10072, 10084, 10160, 10161, 10032-1, 10192, 10187, 10158, 10032, 10208, 10111, 10113, 10446, 10447, 10212, 10213, 10216, 10450, 10451, 88001, 88002, 88003, 88004, 88005, 88006, 88007, 88008, 88009, 77004, RU 1331-18, 10241, BS60LNK, L-SICSET-STE

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: Disse sakse bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

Tilsigtet anvendelse af instrumentet: En saks er beregnet til at skære og forberede væv, hud, tråd og søm / forbindingsmateriale i forskellige anvendelsesområder

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af produktet: Enheden er lavet af en skarp forkant i den ende og et håndtag i den anden ende. Kirurgiske sakse findes forskellige størrelser og modeller.

Garanti: Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: ingen specielle krav

Rengøring: Tør saksen af med en fugtig klud eller et overfladerensmiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

Desinfektion: Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

Sterilisering: Saksene kan steriliseres i en autoklave. Saksene er fremstillet af rustfrit stål.

Vedligeholdelse: Saksene behøver jævnlig vedligeholdelse. - Saksens lås skal olieres med hvid olie af medicinsk kvalitet og det kan være nødvendigt at slibe saksene.

Inspektions- og funktionstest: Sørg for at saksen let kan åbnes og lukkes. Undersøg visuelt for skader og slid.

Emballage: Saksene er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

Opbevaring: ingen særlige krav

Bortskaffelse: Dette produkt kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse