

VEJLEDNING PC

I din webbrowser på din PC, går du til:

online.isoeyes.com

1.Registrering af serienummer

Du skal nu indtaste dit serienummer for at aktivere EyeHandy:

1. Vælg knappen "Registrering"
2. Indtast dit erhvervede serienummer og tryk "**Aktivér**"
3. Serienummeret kan kun anvendes på een enhed ad gangen, så skal det fjernes fra enheden, skal de ske i kontrolpanelet.
4. Er serienummeret ikke anvendt på anden enhed, bliver ud lukket ind og kan nu anvende EyeHANDY.

2. Kalibrering

Du skal nu indstille EyeHANDY til din aktuelle skærm, så synstavler er korrekte i størrelse:

1. Du er på **forsiden** i app'en.
2. Vælg knappen "**Gå til klargøring...**"
3. Tryk på "**Kalibrering**"
4. Hold et kreditkort op mod skærmen og brug skyderen til at tilpasse kortets størrelse på skærmen. Når det passer, er skærmen kalibreret korrekt.



3. Standardafstand

Du skal nu indstille EyeHANDY til standardafstand:

1. Tryk på "**Vælg Afstand**"
2. og set slideren på 300 cm
3. Du kan senere ændre den frit for TABLETTAVLER.

4. Vælg din enhed

Du skal nu indstille hvilken enhed EyeHandy kører på:

1. Tryk på "**Vælg din Enhed**"
2. og vælg Neutral for nu, indtil din enhed optræder i listen over enheder.

5. Vælg Sprog

Du skal nu indstille hvilket sprog du vil køre på.

(Bemærk at denne feature er under tilpasning, så jeg vil anbefale at du her og nu anvender DANSK.)

6. Synstestoversigt

Tilbage på forsiden kan du trykke på "**Gå til valg af synstests**" for at se de tilgængelige tests.