

EasyCrush 2026 — Brugsanvisning

Læs denne brugsanvisning før apparatet tages i brug, og opbevar den sammen med apparatet. Dokumentet dækker tilsigtet brug, sikkerhed, knuseprotokollen, rengøring, opbevaring, bortskaffelse og tekniske data. Kontrollér altid medicinens egen dokumentation, eller spørg en farmaceut, før du knuser en tablet.

1 Tilsigtet brug

EasyCrush 2026 er en elektrisk pilleknuser til plejehjem, hospitaler, apoteker og hjemmepleje, hvor faste orale lægemiddelformer skal knuses sikkert og gentagne gange. Tabletterne knuses inde i et engangsmedicinbæger, der er forseglet med en rondel, så pulveret bliver i bægeret: intet medicinstøv slipper ud i rummet, og intet føres videre fra én beboer til den næste. Apparatet er udelukkende beregnet til at knuse faste orale lægemiddelformer (tabletter, piller). Enhver anden anvendelse ligger uden for den tilsigtede brug.

Bemærk

EasyCrush 2026 er **ikke medicinsk udstyr**. Apparatet er klassificeret som maskineri til tilberedning af fødevarer eller lægemidler under HS-kode 8438.80.9900. Det vurderer, diagnosticerer eller doserer ikke medicin — beslutningen om, hvorvidt en given tablet må knuses, ligger altid hos den ordinerende læge eller farmaceuten.

2 Sikkerhedsanvisninger

Generelt

- Anvend kun apparatet til det tilsigtede formål.
- Lad ikke børn eller uautoriserede personer betjene apparatet.
- Hold hænder, hår og løstsiddende tøj væk fra malehovedet.
- Placér apparatet på et stabilt, plant underlag før brug.
- Flyt ikke apparatet, mens en cyklus kører.

El-sikkerhed

- Brug kun den medfølgende oplader.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske.
- Er oplader eller kabel beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller en autoriseret tekniker.
- Oplad ikke apparatet i våde omgivelser.

Hygiejne

- Brug altid et engangsbæger og en rondel — én dosis, ét sæt.
- Genbrug aldrig bægre eller rondeller: genbrug ophæver det lukkede systems beskyttelse mod krydskontaminering.
- Aftør malehovedet med sprit efter hver brug.
- Rengør ydersiden med en blød, fugtig klud. Brug ikke skuremidler.

Advarsler

- Knus aldrig mere end 8 tabletter ad gangen.
- Brug aldrig apparatet med låget åbent eller ulåst.
- Stop brugen straks ved usædvanlig lyd, lugt eller varme.
- Knus ikke depottabletter, enterotabletter eller cytostatika, medmindre en farmaceut har godkendt det.

3 Pakkens indhold

- EasyCrush 2026 hovedenhed
- Malehoved i rustfrit stål — lille
- Malehoved i rustfrit stål — stort
- Sikkerhedslåg
- Strømforsyning / oplader
- Engangsmedicinbægre (små og store)
- Rondeller (foliesegl)
- Bægerlåg (små og store)
- Denne brugsanvisning

4 Brugsanvisning – knuseprotokollen

De fire trin nedenfor er hele rutinen for én dosis. Der rengøres ikke mellem beboere: bægeret og rondellen er engangsartikler og kasseres sammen med dosen.

1

Forbered

1. Placér apparatet på et stabilt underlag.
2. Tryk på **ON/OFF** for at tænde – indikatorlyset lyser blåt.
3. Tryk på **MODE** for at vælge antallet af knusecyklusser: 8, 10, 12 eller 14.
4. Frigør fjederlåsen, og drej låget mod uret for at tage det af.

Standardindstillingen er 10 cyklusser, hvilket tager ca. 8 sekunder. Brug 12 eller 14 til hårdere tabletter.



2

Fyld

1. Vælg bægerstørrelsen til dosen.
2. Læg tabletterne i engangsbægeret.
3. Dæk bægeret med en rondel (foliesegl).
4. Sæt malehovedet ned i bægeret oven på rondellen.

Lille bæger: 1–4 tabletter · stort bæger: 1–8 tabletter.
Overskrid aldrig 8 tabletter i én cyklus.



3

Knus

1. Sæt det klargjorte bæger – med rondel og malehoved – på bundpladen.
2. Sæt låget på igen, og drej det med uret, indtil fjederlåsen låser.
3. Knusningen starter automatisk, når låget er låst.

Et grønt lys bekræfter, at låget er låst. Standardindstillingen på 10 cyklusser tager ca. 8 sekunder; lyden stopper, og et hvidt lys viser, at den er færdig.



4

Efter brug

1. Tag låget af, og tag bægeret ud med malehovedet i.
2. Hold rondellen på plads med en finger, og løft forsigtigt malehovedet ud.
3. Sæt malehovedet tilbage på soklen.
4. Hold rondellen fast, og bank let på den, så pulveret falder ned i bægeret, og kassér derefter rondellen.
5. Bland pulveret med vand, gel eller mad og giv det, eller sæt et bægerlåg på og transportér dosen.

Kassér bæger og rondel sammen med dosen. Der skal ikke vaskes noget mellem beboere.



5 Indikatorlys og betjening

- **Blåt** — apparatet er tændt og klar.
- **Grønt** — låget er låst, og cyklussen kører.
- **Hvidt** — cyklussen er færdig, og låget kan åbnes.
- **ON/OFF** — tænder og slukker apparatet.
- **MODE** — skifter mellem 8, 10, 12 og 14 knusecyklusser og tilbage til 8.
- Oplad apparatet, når indikatoren ikke længere lyser ved tryk på ON/OFF.



Bemærk

Engangsartikler: bægre og rondeller er beregnet til én dosis. Knus aldrig mere end 8 tabletter ad gangen, og brug aldrig apparatet med låget åbent. Må en tablet ifølge sin egen dokumentation ikke knuses, så lad være — bed i stedet den ordinerende læge om en flydende eller dispergerbar form.

6 Rengøring & vedligeholdelse

- Rengør ydersiden med en blød, fugtig klud. Brug ikke skuremidler eller opløsningsmidler.
- Aftør malehovedet med sprit efter hver brug.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand.
- Opbevar malehovedet på soklen, når det ikke er i brug.
- Udskift bægre og rondeller efter hver dosis.
- Kontrollér jævnlige låg og malehoved for slitage, og udskift dem ved skader.



7 Opbevaring, transport & bortskaffelse

Opbevaring & transport

- Opbevares tørt og køligt.
- Undgå direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Transportér i den originale emballage for at undgå skader.

Bortskaffelse & genanvendelse

- Bortskaf apparatet i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU).
- Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
- Emballagen kan genanvendes.
- Brugte bægre og rondeller bortskaffes med institutionens medicinalaffald.

8 Tekniske specifikationer

Produktnavn	EasyCrush 2026
Type	Elektrisk pilleknuser, lukket system
Knusecyklusser	8 / 10 / 12 / 14 via MODE — standard 10 (ca. 8 s)
Kapacitet	1–4 tabletter (lille bæger) · 1–8 (stort)
Bægevolumen	Lille ca. 30 ml · stort ca. 47 ml
Malehoveder	AISI 304 · Ø4.6 cm / Ø5.7 cm
Strømforsyning	Genopladeligt batteri · oplader 100–240 V AC
Opladningstid	Ca. 4 timer
Mål	177 × 114 × 183.5 mm
Vægt	2.1 kg
Støjniveau	< 48 dB
Karton — apparat	20 × 20 × 20 cm (1) · 44 × 41 × 22 cm (4)
Karton — rondeller	10 × 10 × 12 cm (2.100)
Karton — bægre, små	36 × 19.5 × 25 cm (2.100)
Karton — bægre, store	47 × 24 × 30 cm (2.100)
Karton — låg, små	28.5 × 21.5 × 26 cm (2.000)
Karton — låg, store	28 × 26 × 31 cm (2.000)
Klassificering	Ikke medicinsk udstyr · HS 8438.80.9900
GTIN	5745001384005
Oprindelsesland	Danmark
Garanti	2 år apparat · 1 år batteri

9 Overensstemmelse & konformitet

EasyCrush 2026 opfylder følgende EU-direktiver og forordninger for ikke-medicinsk elektrisk udstyr:

- Maskindirektivet 2006/42/EF
- Lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU
- WEEE-direktivet 2012/19/EU

Overensstemmelseserklæring kan rekvireres.

Support, reservedele eller genbestilling?

Vi svarer på e-mail — normalt inden for én arbejdsdag — og holder gerne en 5-minutters demo for jeres team.

info@easycrush.eu

+45 52 17 58 26 · easycrush.eu

Easycrush ApS · Nydamsvej 43 · 8362 Hørning · Danmark